



Sets de dilatateurs vaginaux Modèles:
Set A - grand, Set B - moyen, Set C - petit

Mise en garde

1. Ce dispositif médical ne doit être utilisé que s'il a été recommandé ou prescrit par un médecin.
2. Ces dispositifs sont destinés à un usage unique pour une patiente. Ils ne doivent pas être utilisés pour plusieurs patientes.

Indications

Les dilatateurs vaginaux ProFem sont destinés aux femmes qui souhaitent désensibiliser ou légèrement dilater leur vagin avant un examen médical, une intervention chirurgicale ou en cas de vaginisme. Les dilatateurs vaginaux ProFem sont disponibles en sets de 4 tailles différentes (petit, moyen, grand et extra grand) ou à l'unité (famille A et B).

Contre-indications

Les dilatateurs ne doivent pas être utilisés en cas d'infections aiguës du tractus génital, d'inflammations du bas-ventre ou chez des patientes non compliantes.

Avertissements

1. Ne pas forcer pour introduire le dilatateur dans le vagin.
2. Une utilisation prolongée et inappropriée des dilatateurs vaginaux peut provoquer des abrasions des parois du vagin et des ulcérations.
3. Si des symptômes comme des saignements, des pertes vaginales, une odeur désagréable ou de fortes démangeaisons apparaissent, signalez-le immédiatement à votre médecin.

Descriptif

1. Les dilatateurs vaginaux ProFem sont en silicone médical auquel est ajouté un colorant. Ils sont non toxiques et sans latex.
2. Les dilatateurs vaginaux ProFem ont une surface lisse, sont légers et flexibles et leur forme spécifique leur permet de rester dans le vagin sans glisser automatiquement. Ils peuvent être mis et enlevés par la patiente elle-même de façon tout à fait simple.

Conseils d'utilisation pour le médecin

Instructions

1. Avant d'utiliser un dilatateur vaginal, réalisez l'examen normal de l'abdomen. Comme indiqué dans le tableau, les dilatateurs vaginaux ProFem sont disponibles en trois sets (A, B et C) avec chacun quatre tailles différentes. Déterminez la taille qui convient à la patiente. Veillez à ce que le choix du set soit fait en fonction de la taille la plus petite disponible dans le set que la patiente peut mettre.
2. Pour faciliter l'introduction, il est recommandé d'utiliser un gel à base d'eau.
3. La personne réalisant l'examen peut utiliser son doigt ou une autre mesure pour déterminer la taille qui convient.
4. Après avoir déterminé la taille ou le set qui convient, il faut inciter la patiente à commencer la thérapie avec le dilatateur le plus petit du set.
5. Le dilatateur doit être assez grand pour remplir le vagin mais ne doit en aucun cas être douloureux ou inconfortable pour la patiente.
6. Il convient de signaler à la patiente qu'elle doit augmenter la taille du dilatateur de manière progressive sur une durée de temps définie.
7. Avertissez la patiente de signaler immédiatement toute gêne ou douleur.
8. Il convient d'expliquer à la patiente comment bien utiliser le dilatateur. Recommander l'utilisation d'un gel lubrifiant à base d'eau.
9. Pour un résultat maximal, il convient de mettre le dilatateur chaque jour entre 5 et 20 minutes. La fréquence et la durée d'utilisation ainsi que le moment où il faut changer de taille pour passer à une taille plus grande doivent être déterminés par le médecin traitant.

Instructions pour le retrait du dilateur et le suivi

1. Pour retirer le dilateur, tirez-le délicatement vers l'extérieur par l'extrémité qui dépasse.
2. Soulignez l'importance des instructions suivantes ainsi que la durée d'utilisation prévue.
3. Assurez-vous dans les premières 24 à 48 heures d'utilisation que la patiente ne présente pas de réaction allergique. Réalisez un examen du vagin et demandez à la patiente si elle a constaté une gêne, des irritations, une pression ou bien des écoulements anormaux. Demandez également si les symptômes se sont améliorés.
4. Prévoyez des rendez-vous de suivi selon les besoins de la patiente.




Instructions d'utilisation pour l'utilisatrice

1. Le choix du bon diamètre ainsi que la durée d'utilisation doivent être déterminés par votre médecin traitant sur la base des conseils d'utilisation pour le médecin.
2. Pour retirer le dilateur, tirez-le délicatement vers l'extérieur par l'extrémité qui dépasse.
3. Après avoir retiré le dilateur, lavez-le en entier avec une solution savonneuse douce en frottant. Puis rincez-le soigneusement à l'eau chaude.
4. Informez immédiatement votre médecin de toutes douleurs.
5. Suivez scrupuleusement les instructions pour introduire et retirer le dilateur.
6. Pour une utilisation plus simple et plus confortable, utilisez un lubrifiant à base d'eau.

Instructions concernant le nettoyage et l'entretien

Avant et après utilisation des dilateurs, l'utilisatrice doit respecter les consignes suivantes:

1. Mettez le dilateur dans de l'eau savonneuse chaude et lavez-le environ pendant 10 minutes. Puis rincez soigneusement le dilateur à l'eau chaude.
2. Après le rinçage à l'eau chaude, séchez le dilateur et enveloppez-le dans un film transparent. Conservez le dilateur à l'abri de la lumière du soleil.

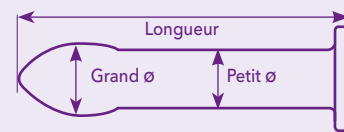

Set-A	Longueur	Petit ø	Grand ø
DT-A/XL	150.0	30.0	38.0
DT-A/L	138.0	25.5	32.0
DT-A/M	128.0	22.5	28.0
DT-A/S	120.0	19.5	24.0
Set-B	Longueur	Petit ø	Grand ø
DT-B/XL	95.0	26.0	33.0
DT-B/L	86.0	22.5	28.0
DT-B/M	78.0	19.5	23.0
DT-B/S	75.0	12.5	17.0
Set-C	Longueur	Petit ø	Grand ø
DT-C/XL	75.0	13.5	18.0
DT-C/L	65.0	12.0	16.0
DT-C/M	60.0	10.5	14.0
DT-C/S	50.0	9.5	13.0

Toutes les dimensions sont en mm

sayco Pty Ltd
 Bureau Allemagne
 Posener Str. 48
 74321 Bietigheim-Bissingen
 R.F.A.
 Tel. +49 7142 7792427
 Fax +49 7142 7792428
 customerservice@sayco.net.au
 www.profem.eu

ProFem® ® ProFem est une marque déposée de SAYCO Pty Ltd



Panpac Medical Corporation
 6F-2, No. 202, Sec. 3, Ta-Tong Road,
 Shi-Chih District, New Taipei City, Taiwan
 Tel. 886-2-86472242, FAX 886-2-86472770



Wellkang Ltd
 Suite B, 29 Harley Street
 LONDON, W1G 9QR, U.K.



ATTENTION



DATE DE PÉREMPTION



SANS LATEX



LIRE LE MODE D'EMPLOI